


SYSTEM ZDROWEGO SIEDZENIA:

Warunkiem prawidłowego działania Systemu jest poprawne dopasowanie fotela do sylwetki.

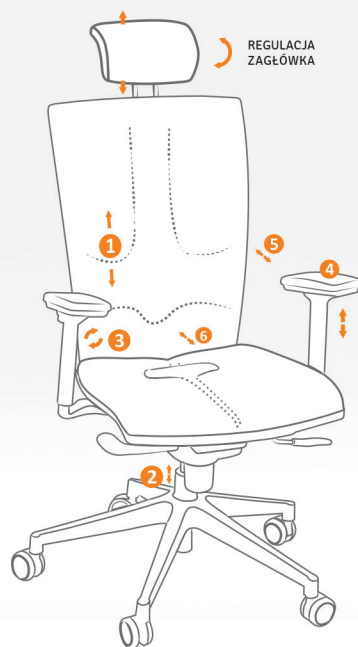

1 Wysokość oparcia

Oburącz chwycić za oparcie i podnieść je maksymalnie do góry, potem opuścić w dół. Delikatnymi ruchami unieść oparcie do góry i zablokować na wybranej wysokości.



2 Wysokość siedziska

Usiądź na siedzisku, przekręć dźwignię z prawej strony siedziska w górę (siedzisko będzie się powoli obniżało).



3 Kąt nachylenia oparcia i siedziska

Przekręć dźwignię po lewej stronie siedziska maksymalnie ku dołowi, odchyl się do tyłu do momentu uzyskania odpowiedniego kąta nachylenia. Przekręcając dźwignię ku górze blokujemy w wybranej pozycji (oparcie odchyła się synchronicznie z siedziskiem).



4 Regulacja wysokości podłokietnika

Za pomocą przycisku umieszczonego po zewnętrznej stronie nóżki podłokietnika regulujemy jego wysokość (góra dół).



5 Regulacja oporu odchylenia oparcia

Przekręć pokrętkę pod siedziskiem z prawej strony w jedną bądź w drugą stronę (oparcie będzie łatwiej lub mocniej się odchylać).



6 Wysuw siedziska

Usiądź na siedzisku, podciągnij motylek z lewej strony ku górze, wysuń siedzisko do przodu.

Fotele, ze względu na opatentowany sposób wyprofilowania oparcia **czynnie wymuszają** wyprostowaną pozycję podczas siedzenia. **Specjalny kształt siedziska** pozwala na **odciążenie guzów kulszowych**, co powoduje powrót miednicy do prawidłowej fizjologicznej pozycji.

Uwaga: Prosimy pamiętać, że fotel należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Jest on przeznaczony dla jednej osoby. Nie wolno na nim stawać. Nie należy pozostawiać w miejscach o dużej wilgotności powietrza czy też w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

Maksymalne obciążenie dla fotela wynosi 130 kg.

Demontaż lub montaż jakichkolwiek elementów fotela może spowodować utratę gwarancji, oraz niewłaściwe działanie medyczne fotela.

Producent udziela 24 miesięcy gwarancji na elementy mechaniczne oraz wady ukryte powstałe w momencie produkcji.

Reklamacje należy zgłaszać pod nr tel. 0-12 411 22 32 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

System, według którego skonstruowane są nasze fotele, został zgłoszony w urzędzie patentowym. Fotele są zarejestrowane jako Wyrób Medyczny w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.



KULIK SYSTEM

WWW.KULIKSYSTEM.COM

KRZESŁO PROF. REHABILITACYJNE K4 MODEL ELEGANCE

INFORMACJE O PRODUKCIE / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU



KRZESŁO PROF. REHABILITACYJNE KULIK SYSTEM® MODEL ELEGANCE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wytwórca: Gabinet Terapii Manualnej i Bioenergoterapii KULIK SYSTEM®, PL 31-523 Kraków, ul. Beliny-Prażmowskiego 17/13; Biuro Handlowe KULIK SYSTEM®, ul. Cechowa 38, 30-614 Kraków tel. +48 12 411 22 32, www.kuliksystem.com, e-mail: biuro@kuliksystem.pl.

Cel stosowania: Fotel profilaktyczno-rehabilitacyjny ma na celu zarówno profilaktykę, jak i czynne działanie zmierzające do przywrócenia właściwego ułożenia pozycji kręgosłupa. Fotel ten ma na celu przywracanie prawidłowości krzywizn kręgosłupa oraz anatomiczne ułożenie łopatek, wymuszając zachowanie takiego stanu przez cały czas użytkowania.

Wskazania: Zaleca się używanie produktu w celu prawidłowego ułożenia kręgosłupa na całej jego długości jak również zmniejszenia ryzyka powstawania nowych schorzeń kręgosłupa oraz łagodzenia już istniejących. Fotel ten jest przeznaczony dla chorych na lumbago, rwę kulszową i inne zespoły bólowo-korzeniowe, a także dla osób ze zniekształceniami kręgosłupa. Ma on na celu ułatwienie przyjęcia prawidłowej pozycji anatomicznej osobie siedzącej.

Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu, skolioza patologiczna, skolioza strukturalna trzeciego stopnia, powiększona lordoza, osobom mającym inne schorzenia kręgosłupa lub w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości zaleca się konsultację u lekarza specjalisty lub chiropraktyka.

Efekty uboczne: Nie stwierdzono.

Niewłaściwe użytkowania: Producent nie bierze odpowiedzialności za zużycie i wady powstałe podczas niewłaściwego stosowania produktu.

Okres gwarancji: 2 lata od daty zakupu.

Składniki: Elementy tapicerowane: pianka poliuretanowa wysokoelastyczna, tkanina tapicerska 14% bawełna, 86% poliester. Elementy konstrukcji: tworzywo PP, PE, oraz stal.

Sposób czyszczenia i suszenia: Plamy i zabrudzenia tapicerki należy usuwać za pomocą miękkiej ściereczki oraz roztworu wody i mydła (temp. 30°C), ewentualnie łagodnych środków czyszczących; suszyć w temperaturze pokojowej. Części z tworzyw sztucznych czyścić przy pomocy ogólnodostępnych nierysujących środków czystości.

Uwaga: Nie należy czyścić agresywnymi środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze.

Odporność na zmienne warunki środowiska: Chronić przed bezpośrednim wpływem warunków zewnętrznych (zamoczenie, wystawianie na słońce, długotrwały wpływ mrozu).

Wyrób medyczny. Deklaracja zgodności: Fotel profilaktyczno-rehabilitacyjny jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (DZ.U, NR 107, poz 679) i jest klasy 1 reguła 1 a wytwórca potwierdza, że postępuje zgodnie z załącznikiem I i IV Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych różnego przeznaczenia.

KRZESŁO PROF. REHABILITACYJNE KULIK SYSTEM® MODEL ELEGANCE

INSTRUKCJA MONTAŻU



INSTRUKCJA MONTAŻU

1. **Kółka** wcisnąć w otwory podstawy (5szt).
2. Wciskamy **amortyzator** w otwór postawy.
3. Nakładamy **siedzisko wraz z mechanizmem i zamontowanymi podłokietnikami** na amortyzator lekko dociskając.
4. Łącznik **oparcia** wsuń w szczelinę mechanizmu siedziska i przymocuj je za pomocą trzech śrub z kluczem imbusowym dołączonych do zestawu.